


# ONE-STEP

## Prueba de Embarazo


### Instrucciones

- Por favor, lea toda la información de este instructivo antes de realizar la prueba.
- No lo use después de la fecha de caducidad impresa en la bolsa.
- Guarde este producto en un lugar seco a 4-35°C. La bolsa de aluminio debe estar a temperatura ambiente antes de abrirla.
- No congelar.
- Mantener fuera del alcance de los niños.
- Para uso diagnóstico in vitro. No abra la bolsa de la prueba hasta que esté temperatura ambiente y listo para comenzar la prueba.

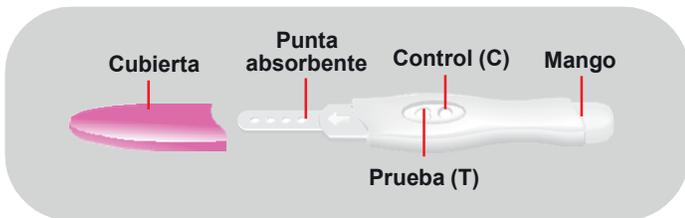

### Instrucciones de uso

1. Retire la prueba de embarazo de la bolsa de aluminio.
2. Retire la tapa y luego vuelva a tapan el lado de agarre del pulgar para alargar el lado de agarre y evitar salpicaduras de orina en la mano.
3. Sostenga la prueba de embarazo con la punta absorbente expuesta apuntando hacia abajo directamente en su chorro de orina durante al menos 10 segundos hasta que esté completamente húmeda. Vea la ilustración a continuación.

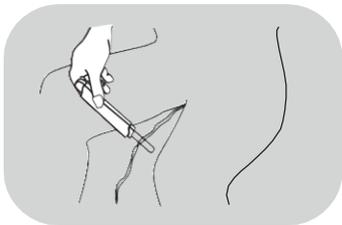

4. Nota: No orine en las ventanas de prueba y control. Si lo prefiere, puede orinar en un recipiente limpio y seco, luego sumerja solo la punta absorbente de la prueba de embarazo en la orina durante al menos 10 segundos.

5. Después de retirar la prueba de embarazo de su orina, vuelva inmediatamente a colocar la tapa sobre la punta absorbente, coloque la prueba de embarazo sobre una superficie plana con las ventanas de prueba y control hacia arriba y luego comience a cronometrar el tiempo.

6. A medida que la prueba comienza a funcionar, puede notar un flujo rojo claro que se mueve a través de las ventanas Prueba y Control. Espere 5 minutos para leer los resultados. Dependiendo de la concentración de hCG en la muestra de ensayo, se pueden observar resultados positivos en 1 minuto o menos. Sin embargo, para confirmar los resultados negativos, se requiere el tiempo de reacción completo de 5 minutos. **NO LEA LOS RESULTADOS DESPUÉS DE 10 MINUTOS.**

### Cómo leer los resultados



#### EMBARAZADA

La presencia de dos líneas rojas, una línea en la ventana de prueba (T) y una línea en la ventana de control (C), significa que probablemente esté embarazada. Una línea puede ser más ligera que la otra, no tienen que coincidir.

#### NO ESTÁ EMBARAZADA

La presencia de una línea roja en la ventana de control (C) significa que probablemente no esté embarazada.

#### RESULTADO INVÁLIDO

El resultado no es válido si no aparece ninguna línea roja en la ventana de control (C). incluso si aparece una línea en la ventana de prueba (T). Debe repetir el proceso con una nueva prueba.

#### \*\*PRECAUCIONES:

Se recomienda reducir la ingesta de agua antes de la prueba. La ingesta de agua puede diluir la muestra de prueba y puede afectar la detección de hCG.

\*\*Beber alcohol durante el embarazo puede ser perjudicial para el feto.

## Preguntas y Respuestas

1. **P:** ¿Cómo funciona la prueba?

**R:** La prueba de embarazo GoldenVac One Step detecta una hormona en la orina que su cuerpo produce durante el embarazo gonadotropina coriónica humana o hCG). La cantidad de hormona del embarazo a medida que avanza el embarazo.

2. **P:** ¿Qué tan pronto después de sospechar que estoy embarazada puedo hacerme la prueba?

**R:** Puede analizar su orina tan pronto como el primer día que no tenga su período. Puede realizar la prueba en cualquier momento del día, sin embargo, si está embarazada, la orina de la primera mañana contiene la mayor cantidad de hormonas del embarazo.

3. **P:** ¿Tengo que hacer la prueba con la primera orina de la mañana?

**R:** Aunque puede realizar la prueba en cualquier momento del día, su primera muestra de orina de la mañana suele ser la más concentrada del día y tendría la mayor cantidad de hCG.

4. **P:** ¿Qué tan precisa es la prueba?

**R:** En estudios clínicos de laboratorio y de consumo, se ha demostrado que la prueba de embarazo GoldenVac One Step tiene una precisión del 99%.

5. **P:** ¿Qué factores pueden afectar el resultado de la prueba?

**R:** Los medicamentos que contienen hCG como pregnyl profasi, pergonat APL pueden dar un resultado falso positivo. Alcohol, anticonceptivos orales, hCG no deben afectar el resultado de la prueba.

6. **P:** ¿Qué debo hacer si el resultado muestra que estoy embarazada?

**R:** Significa que su orina contiene hCG y probablemente esté embarazada. Consulte a su médico para confirmar que está embarazada y para discutir los pasos que debe tomar.

7. **P:** ¿El resultado significa algo más que un embarazo normal si muestra que estoy embarazada?

**R:** Una serie de condiciones médicas distintas del embarazo, entre ellas quiste ovárico o embarazo ectópico (embarazo fuera del útero) puede causar niveles elevados de hCG.

8. **P:** ¿Cómo sé que la prueba se ejecutó correctamente?

**R:** La aparición de una línea roja en la ventana de control (C) le indica que siguió el procedimiento de prueba correctamente y que se absorbió la cantidad adecuada de orina.

9. **P:** ¿Qué debo hacer si el resultado muestra que no estoy embarazada?

**R:** Significa que no se ha detectado hCG en la orina y probablemente no esté embarazada. Si no comienza su período dentro de una semana de su fecha de parto, repita el proceso con una nueva prueba. Si recibe el mismo resultado después de repetir la prueba y aún no tiene su período, debe consultar a su médico.