



TECNOLOGÍA ORIENTADA A LA INNOVACIÓN



CATÁLOGO DE PRODUCTOS



E-MAIL:

ventas@goldenvac.com.mx



CONTACTO:

662 207 4445
662 110 2313



SITIO WEB:

www.goldenvac.com.mx

UBICACIÓN

Bld. Antonio Quiroga 551-12, Dunas,
Hermosillo Sonora, México. CP 83179

Bld. Perimetral Norte 1668, Casa Bonita
Hermosillo Sonora, México. CP 83175

Tubo Activador Coágulo + Gel

Tubo activador coágulo + gel tiene como objetivo obtener muestras de suero de alta calidad para pruebas de bioquímica, inmunología y serología en inspección clínica.

Dentro del tubo hay gel presente en el fondo, que es una sustancia estable en propiedades fisicoquímicas, el gel puede evitar la descomposición a alta temperatura y la precipitación de moléculas pequeñas, por lo que reduce en gran medida el riesgo de obstrucción del equipo de prueba.





Recomendaciones de Uso:

- ✓ Después de la recolección, invertir suavemente el tubo de 6 a 8 veces.
- ✓ Tiempo de reposo antes de la centrifugación: de 30 a 120 minutos.
- ✓ Centrifugación: 1600 - 2000 g x 10 minutos a 20 - 25 ° C.
- ✓ Tiempo de retracción del coágulo: 30 minutos.

Conservación de la muestra:



TEMPERATURA

Hasta 24 ° C

2 - 4 ° C

≤ -20 ° C



TIEMPO DE CONSERVACIÓN

Hasta 7 horas

Hasta 48 horas

Más de 48 hrs.

Especificaciones Técnicas:

- ✓ Vacío ajustado para el Altiplano Mexicano
- ✓ Caducidad de 24 meses.



Tamaño:
13 x 100 mm

Código: **GD050SGC**



Volumen
Aspirado: 5 ml

No. de Cuadro Básico: 080.909.6530

Registro Sanitario No. 0475R2014 SSA



Presentación:
1 caja c/12 gradillas

