



TECNOLOGÍA ORIENTADA A LA INNOVACIÓN



CATÁLOGO DE PRODUCTOS



E-MAIL:

ventas@goldenvac.com.mx



CONTACTO:

662 207 4445
662 110 2313



SITIO WEB:

www.goldenvac.com.mx

UBICACIÓN

Blvd. Antonio Quiroga 551-12, Dunas,
Hermosillo Sonora, México. CP 83179

Blvd. Perimetral Norte 1668, Casa Bonita
Hermosillo Sonora, México. CP 83175

Tubo Morado

El tubo EDTA es el tubo estándar utilizado en hematología clínica, pruebas cruzadas, grupos sanguíneos y diversos instrumentos de análisis de células sanguíneas.

El aditivo EDTA, actúa como un potente anticoagulante al unirse al calcio en la sangre.





Recomendaciones de Uso:

- ✓ Después de la recolección, invertir suavemente el tubo de 6 a 8 veces.
- ✓ Mezcle la muestra cuidadosamente antes de utilizar.
- ✓ Para obtener plasma: Centrifugar a 1300 g x 10 minutos a 20 - 25 ° C.

Conservación de la muestra:



TEMPERATURA

Hasta 24 ° C

2 - 4 ° C

≤ -20 ° C



TIEMPO DE CONSERVACIÓN

Hasta 8 horas

8 - 48 hrs

más de 48 hrs.

Especificaciones Técnicas:

- ✓ Vacío ajustado para el Altiplano Mexicano
- ✓ Caducidad de 24 meses.



Tamaño:
13 x 75 mm



Volumen
Aspirado: 4 ml



Presentación:
1 caja c/12 gradillas

Código: GD040EK2

No. de Cuadro Básico: 080.909.6498

Registro Sanitario No. 0475R2014 SSA

