



TECNOLOGÍA ORIENTADA A LA INNOVACIÓN



CATÁLOGO DE PRODUCTOS



E-MAIL:

ventas@goldenvac.com.mx



CONTACTO:

662 207 4445
662 110 2313



SITIO WEB:

www.goldenvac.com.mx

UBICACIÓN

Blvd. Antonio Quiroga 551-12, Dunas,
Hermosillo Sonora, México. CP 83179

Blvd. Perimetral Norte 1668, Casa Bonita
Hermosillo Sonora, México. CP 83175

Tubo de suero

Activador de Coágulo

El tubo de Pro- coagulación tiene como objetivo, obtener muestras de suero que se utilizan para pruebas bioquímicas e inmunología. La **pared interior** está finamente **recubierta** con coagulante que puede promover la coagulación de la sangre después de la recolección.

La **cantidad apropiada de coagulante**, logra la coagulación de la sangre en un tiempo relativamente corto, **evitando** así el posible problema de **hemólisis** causado por una coagulación demasiado rápida.

Finalmente, el suero transparente se puede separar después de la centrifugación.





Recomendaciones de Uso:

- ✓ Después de la recolección, invertir suavemente el tubo de 6 a 8 veces.
- ✓ Tiempo de reposo antes de la centrifugación: de 30 a 120 minutos.
- ✓ Centrifugación: 1300 g x 10 minutos a 20 - 25 ° C.
- ✓ Tiempo de retracción del coágulo: 30 minutos.

Conservación de la muestra:



TEMPERATURA

Hasta 24 ° C

2 - 4 ° C

≤ -20 ° C



TIEMPO DE CONSERVACIÓN

Hasta 8 horas

8 - 48 hrs

más de 48 hrs.

Especificaciones Técnicas:

- ✓ Vacío ajustado para el Altiplano Mexicano
- ✓ Caducidad de 24 meses.



Tamaño:
13 x 100 mm

Código: GD060CA



Volumen
Aspirado: 6 ml

No. de Cuadro Básico: 080.909.6506

Registro Sanitario No. 0475R2014 SSA



Presentación:
1 caja c/12 gradillas

