



TECNOLOGÍA ORIENTADA A LA INNOVACIÓN



CATÁLOGO DE PRODUCTOS



E-MAIL:

ventas@goldenvac.com.mx



CONTACTO:

662 207 4445
662 110 2313



SITIO WEB:

www.goldenvac.com.mx

UBICACIÓN

Bld. Antonio Quiroga 551-12, Dunas,
Hermosillo Sonora, México. CP 83179

Bld. Perimetral Norte 1668, Casa Bonita
Hermosillo Sonora, México. CP 83175

Tubo Verde

Heparina de Litio

El tubo Verde Heparina de Litio GoldenVac se utiliza para extraer plasma heparinizado o sangre total para pruebas bioquímicas y hemorreológicas de emergencia.

El anticoagulante heparina activa la antitrombina, que bloquea la cascada de coagulación y produce así una muestra de sangre/plasma total.

La heparina de litio no interfiere durante el análisis en la detección de iones, incluido el ion sodio.





Recomendaciones de Uso:

- ✓ Inmediatamente después de la recolección, invertir suavemente el tubo de 8 a 10 veces.
- ✓ Centrifugación: $\leq 1,300$ g durante 10 minutos a 20 - 25 ° C.

Conservación de la muestra:

La temperatura y el tiempo de conservación adecuados dependen del tipo de prueba a realizar.

Especificaciones Técnicas:

- ✓ Vacío ajustado para el Altiplano Mexicano
- ✓ Caducidad de 24 meses.



Tamaño:
13 x 100 mm

Código: GD060LH



Volumen
Aspirado: 6 ml

Registro Sanitario No. 0475R2014 SSA



Presentación:
1 caja c/12 gradillas

